


PosiSep® X

Die selbstauflösende
Nasentamponade
aus Chitosan

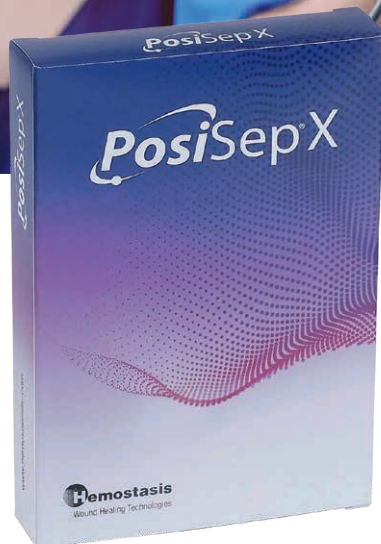

neuwirthmedical.

Produkteigenschaften

PosiSep® X ist eine selbstauflösende Tamponade aus natürlich vorkommendem „Chitosan“.

PosiSep® X wird nach Nasennebenhöhlen-Eingriffen trocken in den mittleren Nasengang platziert und intranasal bewässert.

Chitosan wirkt aufgrund seiner besonderen Beschaffenheit:

- **Hämostatisch**
- **Antibakteriell**
- **Antimykotisch**

Vorteile für Arzt und Patient

- Blutstillend
- Trennung von Wundoberflächen
- Keine Krustenbildung
- Geringer postoperativer Aufwand
- Hoher Patientenkomfort
- Medikamententräger
- Postoperative Stabilisation der mittleren Nasenmuschel



Vor der Wässerung

PosiSep® X wird intranasal gewässert und dehnt sich durch die Hydratation zu einem Gel-Kissen aus



Nach der Wässerung

Durch diese einzigartigen Eigenschaften bietet es dem Operateur ein besonderes Maß an Sicherheit und für Patienten einen besonders hohen Komfort in der postoperativen Nachsorge.

Je nach Produktvariante löst sich PosiSep® nach 3–5 Tagen bzw. PosiSep® X nach 7–10 Tagen auf und fördert in dieser Zeit die postoperative Wundheilung.



Indikationen

- (komplexe) FESS-Eingriffe
- Medikamentöse Behandlung der Wundoberflächen
- Revisionen
- Blutstillung (z. B. nach Sphenopalatinakoagulation)
- Rhinoplastik
- Prävention von Synechien
- Unterstützung der feuchten Wundheilung

OP-Leitfaden

Vorbereitung vor dem Einsatz: Überschüssiges Blut absaugen.



Die Tamponade wird trocken im mittleren Nasengang/Siebbeinschacht eingesetzt und platziert. Nach Hydratation sollte die Position der Tamponade nicht mehr verändert werden. Falls nötig, kann die Tamponade den anatomischen Gegebenheiten individuell angepasst und vor dem Einsatz zurechtgeschnitten werden.



Nach Platzierung wird die Tamponade intranasal mit NaCl oder einem Medikament gewässert. Hierbei liegt die empfohlene Flüssigkeitsmenge je nach Tamponadengröße zwischen 10–20 ml pro Tamponade. Es können alle Medikamente verwendet werden, die nicht auf Öl basieren. Gängige Kortikoide sind beispielsweise Triamcinolon oder SoluDecortin H.



Nach der Platzierung der Tamponade sollte die Hydratation zeitnah erfolgen, damit sich PosiSep® X vor allem mit der (Kortison-)Lösung und nicht mit Blut oder Gewebsflüssigkeit füllt.



Der Auflösungszeitraum beträgt 7–10 Tage bei PosiSep® X beziehungsweise 3–5 Tage bei PosiSep®. PosiSep® X muss grundsätzlich nicht abgesaugt werden, kann aber bei Bedarf jederzeit entfernt werden. Postoperativ soll ab dem ersten Tag dreimal täglich eine Nasenspülung für insgesamt zehn Tage erfolgen.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten

Bei Revisionen, ausgeprägter Nasenhaupthöhle oder der Notwendigkeit einer erhöhten Kompressionswirkung empfiehlt der Hersteller folgende Handhabung:



A) Durch die Verwendung eines zusätzlichen PosiSep® X Streifens oder bei Teilung der Tamponade wird eine deutlich sichtbare Volumenveränderung der Tamponade erzeugt. Hierbei wird empfohlen, die intranasale Hydratation zwischen den Tamponadenstreifen vorzunehmen.



B) Ebenso kann PosiSep® X vor dem Einsatz im trockenen Zustand gefaltet positioniert werden.

● BESTELLINFORMATIONEN

PosiSep® X Hämostatische Nasentamponade

Art. Nr.	Größe/Einheit	Pharma- zentralnummer	Auflösungs- zeitraum
921 5664	1,3 x 3,8 cm / 8 Stück (pro VE)	111 906 18	7–10 Tage
921 5674	1,5 x 5,1 cm / 8 Stück (pro VE)	111 905 93	7–10 Tage
921 5686	1,8 x 8,0 cm / 8 Stück (pro VE)	121 460 80	7–10 Tage

PosiSep® Hämostatische Nasentamponade

921 5644	1,3 x 3,8 cm / 8 Stück (pro VE)	111 906 01	3–5 Tage
921 5654	1,5 x 5,1 cm / 8 Stück (pro VE)	111 905 87	3–5 Tage



Direkt zu Ihrem
Ansprechpartner –
buchen Sie Ihren
Beratungstermin



Neuwirth Medical Products
Am Südkreisel 5
63868 Großwallstadt

Tel 06022 70 96 0
Fax 06022 70 96 20

info@neumedpro.de
www.neumedpro.de

Neuwirth Medical
Online-Shop

