

### 6.1.1 Reinigen des WatchPAT™-Geräts

Die Reinigung des WatchPAT™-Geräts und der Transporttasche ist wie folgt durchzuführen:

- Teile mit einem sauberen, fusselfreien und mit 70 % Methylalkohol oder Isopropanol (IPA) leicht angefeuchteten Wischtuch abwischen.



#### Warnung

Das WatchPAT™-Gerät nur mit angeschlossener uPAT-Sonde reinigen.

### 6.1.2 Reinigen des Handgelenk-Armbands

Das Handgelenk-Armband kann mit einem fusselfreien Tuch mit 70% Methylalkohol oder Isopropanol (IPA) leicht angefeuchtetem Wischtuch gereinigt werden.

Zur Desinfektion des Handgelenk-Armbands durch Eintauchen in eine Desinfektionslösung sind die folgenden Schritte zu beachten:

- Das WatchPAT™-Gerät vom Handgelenk-Armband entfernen
- Handgelenk-Armband in 70% Methylalkohol oder Isopropanol (IPA) eintauchen

### 6.1.3 Die uPAT-Sonde

Die uPAT-Sonde ist zur einmaligen Verwendung vorgesehen. Sie darf nicht gereinigt sondern muss vor jeder Studie ersetzt und vorschriftsgerecht entsorgt werden.

### 6.1.4 Der Schnarch- und Körperlage-Sensor

Sensor und Kabel gründlich mit 70% Methylalkohol reinigen.